

دستگاه آرایش دائم موزاییک بیوتاچ



Mr.Tattoo

- www.mrtattoo.ink
- +9841 715 999
- @mr_tattoo_ink
- www.aparat.com/mrtattoo
- @mrtattoo.ink



۱ . سوکت برق



۲ . کلید خاموش و روشن

۳ . کنترل سرعت

۴ . موتور

۵ . شافت انتقال

۶ . سوزن

۷ . غلاف

۸ . روکش سوزن



a . شفاف

b . استیل - قابل اتوکلاو

۹ . سرپلاک

۱۰ . آداتپر

۱۱ . پدال

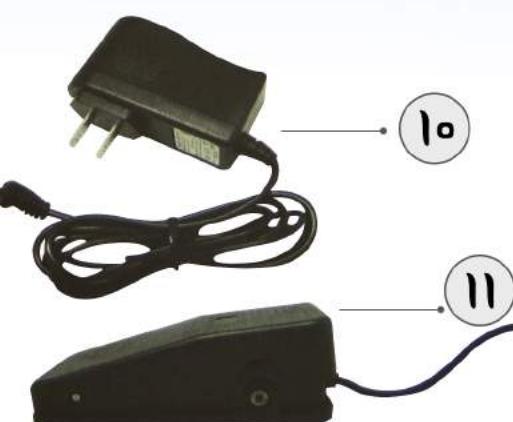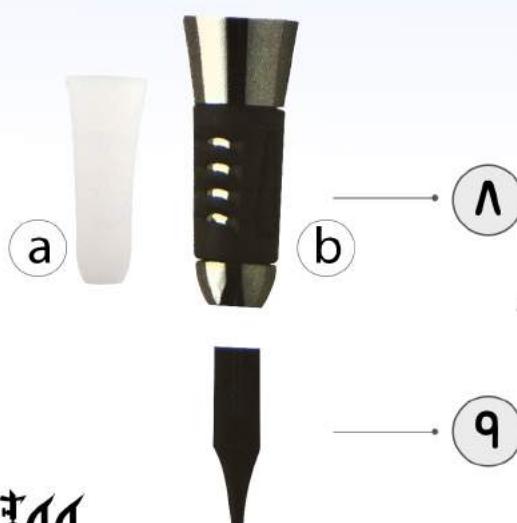

م.ر.تاتو

www.mrtattoo . ink

۰۹۰۶۱ ۷۱۰ ۹۹۹

@mr_tattoo_ink


www.aparat.com/mrtattoo

@mrtattoo . ink

دستور العمل کاری دستگاه میکروپیگمنتیشن موزائیک

مرحله ۱: شافت انتقال

۱. قسمت موتور را طوری نگهدارید که دستگاه مستقیماً رو به شما و قطعه انتقال در دست راستتان باشد.
۲. شافت انتقال جدید را بردادته و پایه بلندتر دو شاخ را جابزنید.
۳. مطمئن شوید که زائده در سوراخ قفل شده است.

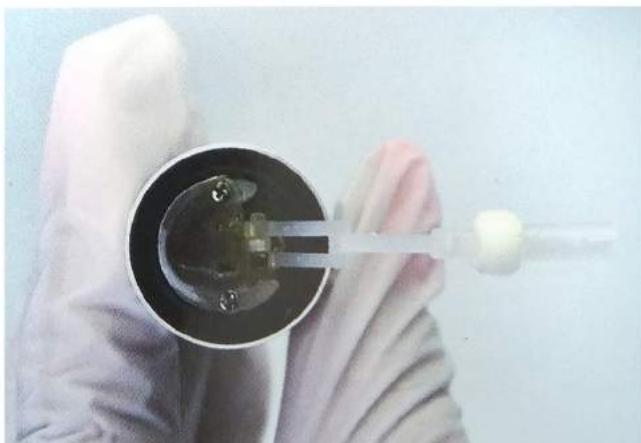

مرحله ۲: غلاف جلو

غلاف را روی شافت انتقال قرارداده و بچرخانید تا محکم شود. زیاد محکم نکنید چون نوک شافت انتقال قادر به نگهداشتن انتهای سوزن نیست.



Mr.Tattoo

www.mrtattoo.in

۰۹۱۶۱ ۷۱۵ ۹۹۹

@mr_tattoo_ink



www.aparat.com/mrtattoo

@mrtattoo.in

مونتاژ دستگاه

مرحله ۳: انتهای سوزن

سوزنی که به دستگاه بخورد را انتخاب کنید. انتهای سوزن دارای پایه دوشاخه با دو زائده در هر طرف است. زمانیکه انتهای سوزن را وارد شافت انتقال کنید، دو زائده سوزن در دو حفره شافت قرار می گیرند.

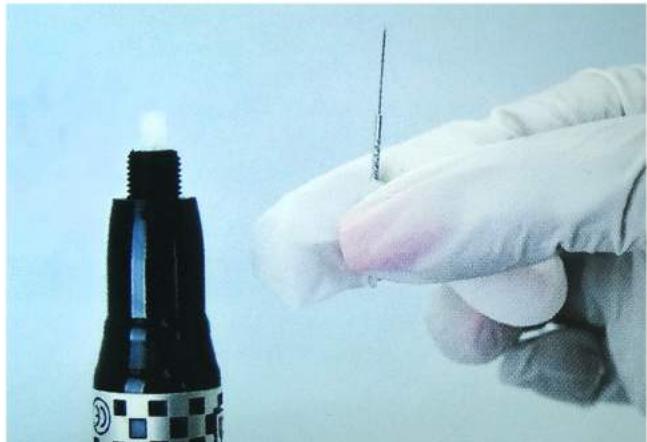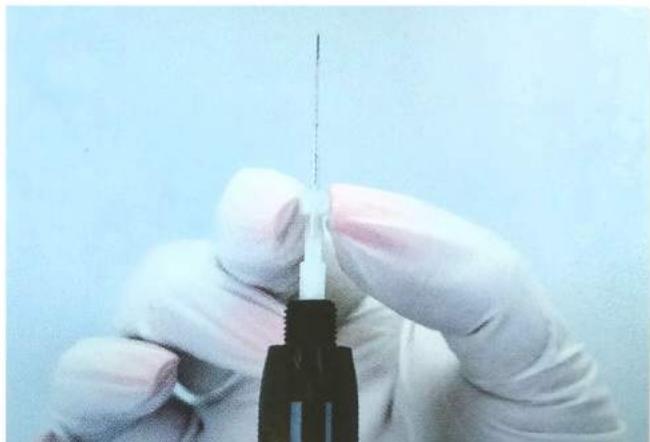

زائده ها باید در حفره ها قفل شود

مرحله ۴: روکش سوزن

روکش شفاف را روی سوزن قرار دهید اما دقیق کنید که با سوزن تماس نداشته باشد یا آن را خم نکند. آن را چرخانده اما خیلی محکم نکنید.



Mr.Tattoo

مرحله ۵: سر پلاک

با توجه به نوع سوزن از سرپلاک گرد یا فلت استفاده کنید. به صورت امنی سرپلاک را روی سوزن قرار دهید. محکم کردن بیش از حد ممکن است حرکت سوزن را محدود کند. بمنظور تنظیم طول سوزن، ابتدا دستگاه را چرخانده سپس سرپلاک را تا ۲ میلیمتر بالا یا پایین کنید تا طول مورد نظر سوزن بدست آید.




باز کردن دستگاه

بعد از انجام فرایند تمامی اجزای یکبار مصرف می باشد دور ریخته و بقیه قطعات بمنظور ضد عفونی باز شود. این کار به سلامتی و استریل دستگاه کمک می کند.

مرحله ۱: روکش سوزن

قبل از هر کاری روکش سوزن را باز تا سوزن داخل سرپلاک خارج شود.

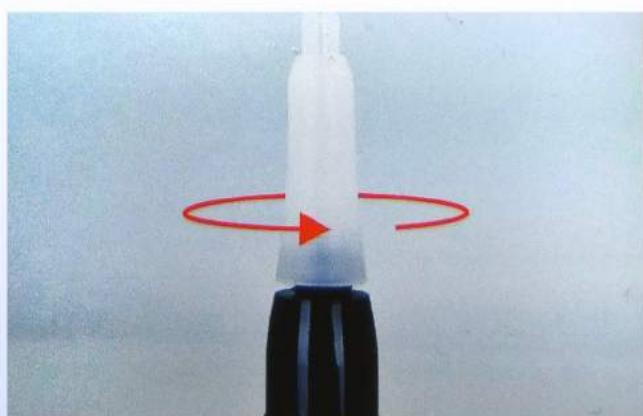

Mr.Tattoo

www.mrtattoo.in

۰۹۱۶۱ ۷۱۵ ۹۹۹

@mr_tattoo_ink

www.aparat.com/mrtattoo

@mrtattoo.in

بازکردن دستگاه

مرحله ۲: غلاف شافت

زمانیکه روکش سوزن را برداشتید می بایست غلاف شافت را چرخانده و باز کنید. توجه داشته باشید که شافت انتقال هنوز متصل است و آن را نکشید.



مرحله ۳: شافت انتقال

در حالیکه قسمت موتور را با یک دست گرفته اید، با دست دیگر شافت انتقال را با غلاف نگهدارید. شافت را ۹۰ درجه چرخانده و به آرامی جهت آزاد شدن هل دهید.



در انتهای تمامی قطعات یکبار مصرف را دور ریخته و آماده ضد عفونی شوید.



نحوه ضد عفونی

مقداری مایع ضد عفونی در ظرفی کوچک ریخته و دستگاه را تا قسمت تنظیم سرعت در محلول قرار دهید. دستگاه را بمدت ۳ دقیقه در همین حالت نگهدارش و بعد آبکشی نمایید. قسمت تنظیم سرعت دستگاه را خیس نکنید و سپس آن را با دستمال تمیز کنید. دستگاه الان ضد عفونی شده است. دستگاه را در جعبه ای تمیز، خشک و بدور از رطوبت و غبار نگهداری کنید.

همه‌ی قطعات یکبار مصرف را
بعد از هر عمل تعویض کنید



عیب یابی

سرعت دستگاه: اگر موتور کند یا سرعتش ضعیف شد، اجازه دهید تا دستگاه خودش بمدت ده تا سی دقیقه کار کند. بعد از این مدت موتور با سرعت مناسب کار می کند.

عملکرد بد دستگاه: بمنظور عملکرد صحیح دستگاه، آن را روشن و هر قسمت را تست کنید. عیوب دستگاه ممکن است بعلت زیاد سفت کردن، زیاد شل بودن، نصب غلط، کجی یا قطعی کابل برق دستگاه و قطعات باشند. برای عیوب پدال، ابتدا فیش و سیم پدال را کشیده و مستقیماً برق را به دستگاه متصل کنید.

مر. تاتو

www.mrtattoo.in

۰۹۱۶۱ ۷۱۵ ۹۹۹

@mr_tattoo_ink

www.aparat.com/mrtattoo

@mrtattoo.in

WAGNER



مشخصات رنگ و گنر

- مواد ۱۰۰٪ آمریکایی و اورجینال
- بکنوختی زیاد طوری که خیلی رقیق نیست و مانند آب جریان نمی یابد و خیلی هم غلیظ نیست و بطری را مسدود نمی کند.
- محصولی حرفه ای برای استفاده ماشین تاتو دیجیتال و قلم دستی
- این رنگ تاتوی ماندگاری را به مرأه جزئیات زیاد ایجاد می کند.
- روی پوست به نرمی می نشیند و بخوبی درمان می شود
- هر رنگ خیلی خوب با دیگر رنگ ها ترکیب می شود.
- مقاوم در مقابل نور و آب و هوا
- ظاهری طبیعی و تنوع رنگ زیاد
- رنگ پذیری سریع
- زود محو نمی شود



www.mrtattoo . ink

۰۹۳۶۱ ۷۱۵ ۹۹۹

@mr_tattoo_ink

www.aparat.com/mrtattoo

@mrtattoo . ink